

QUICKTIP

Brugerkontroller

Efter du har åbnet QuickFit, forbind høreapparaterne. Se QuickTip for tilpasningsprotokol for yderligere information om hvordan du kommer i gang. Brugerkontrollerne vil være tilgængelige i en forberedelsessession, når høreapparatet forbindes første gang. Vælg **Brugerkontroller** i flyout-menuen for at justere brugerkontrollerne i efterfølgende sessioner.

Opsætning af brugerkontroller

Træk din ønskede funktion fra venstre menu til handlingen på højre side.

Mulige brugerkontroller:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| (A) Lydstyrke | (E) Edge Mode+ | (I) Smart Assistant |
| (B) Tinnitus Level | (F) Program | (J) Offline Tilstand |
| (C) Tilbehør start/stop | (G) Mute | |
| (D) Sluk | (H) Manuel Advarsel | |

Mulige handlinger:

- (L) **Kort Tryk:** Program, Lydstyrke, Tinnitus Level, Edge Mode+
- (M) **Tryk og Hold:** Lydstyrke, Program, Tinnitus Level, Mute, Tilbehør start/stop, Sluk, Manuel advarsel, offline mode
- (N) **Dobbelttap**:** Tilbehør start/stop, Smart Assistant, Edge Mode+

NOTE: *Følsomheden for tap-kontrol kan justeres ved at vælge drop down-menuen under Brugerkontroller. Følsomheden kan ændres til at være mere eller mindre følsom end standardindstillingen.*

Administrer telefonopkald

Vælg **Administrer telefonopkald** for brugerkontroller relateret til at besvare eller afvise telefonopkald på iOS-telefoner. Svar, afvis og afslut opkald vil som standard være aktiveret, men kan deaktiveres efter ønske.

Note: Denne funktion er tilgængelig for alle iPhones og vil som standard reagere på et indgående opkald uden at miste andre brugerkontroller (volumenkontrol, programskift, etc.) når der ikke er et aktivt opkald.

Administrer telefonopkald

Tillad brugerkontroknapper at besvare, afvise og afslutte telefonopkald på iOS-telefoner. Brug desuden høreapparatmikrofoner til opkaldet med iOS-telefoner, der understøtter 2-vejs lydstreaming (iPhone 11 og nyere med iOS 15.1 og nyere).



Indgående opkald:

Svar: Kort tryk
Afvisning: Tryk og hold

Under opkald:


Juster lydstyrken: Brug lydstyrken på telefonen; Alternativt justerer Kort tryk lydstyrken, hvis den er konfigureret som volumenkontrol
Besvar nyt indgående opkald: Kort Tryk for at afslutte igangværende opkald og besvare nyt opkald
Afvis indgående opkald: Tryk og hold for at afvise nyt opkald og forblive i det aktuelle opkald
Afslut opkald: Tryk og hold

Volumenkontrol og tinnitusoutput-trinstørrelse

Vælg **VK-område og Trinstørrelse** hvis volumenkontrol er aktiveret. Hvis en tinnitusmasker er aktiveret, vælg **Tinnitus Output og Trinstørrelse**. Se Tinnitus QuickTip for yderligere information.

- 1 Flyt skyderne for at justere volumen.
- 2 Vælg 2dB eller 4dB trinstørrelse.

NOTE: Pro Fit tillader kun justering af volumen og trinstørrelse, såfremt volumenkontrol er aktiveret i brugerkontroller.

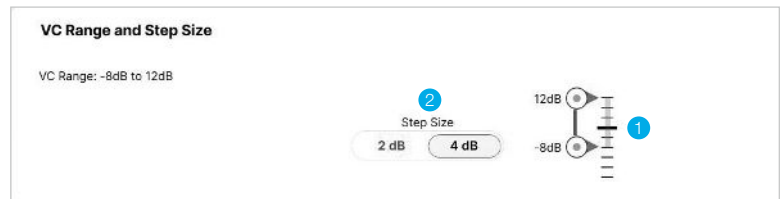

Yderligere konfigurationsmuligheder

Automatisk Edge Mode+ vil være aktiv som standard. Denne kontrol deaktiverer funktionen.

Yderligere Konfigurationsvalgmuligheder

Edge Mode+ Adaptation ⓘ



Nulstil Niveauer ved Programskifte ⓘ

Apparatguide

Vælg **Print** i brugerkontrolindstillinger for at printe apparatguiden. Dette genererer en oversigt over de valgte brugerkontrolindstillinger i de forbundne høreapparater.



*Available on select hearing aids. Contact your rep for specific information. | **Only available on wireless technology.

The Starkey logo and Pro Fit are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 12/23 FLYR4079-02-EN-SC

