

QUICKTIP

Hear Clear voksfiltre til receivere

Produkttilgængelighed: RIC og i-øret

Hear Clear ørevoksbeskyttelsessystemet bruger engangfiltre. De innovative filtre forhindrer ophobning af ørevoks i høreapparatsreceiverne. Monteringspinden til Hear Clear er gul.

Rutinemæssig vedligehold eller udskiftning af Hear Clear voksfiltre sikrer optimal funktionalitet og gavn fra høreapparaterne.

NOTE: *Hear Clear voksfiltre er ikke kompatible med andre producenters produkter.*

Fjern og monter


- 1 Indsæt den tomme ende af monteringspinden i det brugte voksfilter i høreapparatet.

NOTE: *Skub den gule pind direkte ind i det brugte filter. Der er ikke behov for at rotere den gule pind imens.*


- 2 Træk pinden væk fra højttaleren for at fjerne det brugte filter.

- 3 Brug den modsatte ende af den gule pind for at montere det nye filter i højttaleren.

- 4 Træk pinden væk fra højttaleren for at efterlade det nye filter monteret.

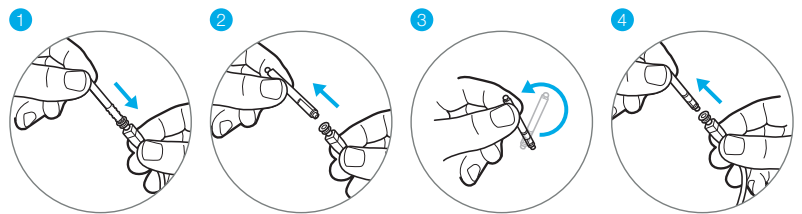

RIC

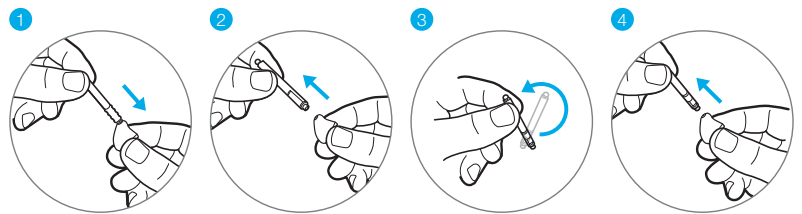

Custom

Brug

- Hear Clear voksfiltre kan bestilles i pakker med 8 eller 48.
- En pakke med 8 filtre bliver sendt med alle RIC eller customprodukter.
- Bestillinger inkluderer: en blå pakke med 8 gule Hear Clear-voksfiltre, og instruktioner i hvordan man skal skifte dem.