

QUICKTIP

My Starkey

Android

**Batteristatus****Smart Assistant**

Tryk for at bruge stemmekommandoer for at ændre programmer, indstille påmindelser, stille spørgsmål vedrørende høreapparatet og meget mere.

Nuværende Program

Normal

Din daglige høreindstilling

Skift mellem programmer

Få adgang til detaljer om det aktuelle program, foretag lydjusteringer og mere.

Edge Mode +

Tryk for at få den bedste lyd i det aktuelle miljø.

Edge Mode⁺

Programmer

Min Hørelse

Min Hørelse

Administrer høreapparat-funktioner og indstillinger.

Programmer

Få adgang til programmer eller opret et brugerdefineret program.

Binaural Volumenkontrol**Hjem**

Hjem



Sundhed



Lær



Mere

Mere

Få adgang til konto- og appindstillinger, påmindelser, oversættelse og mere.

Sundhed

Se fremskridt og indsigt i hørelse og fysisk aktivitet (måler skridt, hvor aktiv du er hver dag og mere).

Lær

Få adgang til vejledning, tips og videoer om høreapparatet.

Hent My Starkey

Du skal have en Google Play Butik-konto for at hente My Starkey. En Google Play Butik-konto kan oprettes ved at gå til **Indstillinger>Konti**. Vælg en eksisterende konto, eller vælg **Tilføj konto** for at oprette en ny konto.

- 1 Når din konto er oprettet, skal du åbne Play Butik.
- 2 Søg efter **My Starkey**.
- 3 Vælg **Installer**.



My Starkey

Parring og konfiguration af My Starkey

My Starkey vil søge efter og parre med høreapparaterne. Parring fuldføres, efter at høreapparaterne er blevet programmeret i Pro Fit-softwaren. Sørg for, at Pro Fit er lukket før parring med enhver Android-enhed.

- 1 Åben My Starkey-appen og tryk på **Kom i gang** for at begynde.
- 2 Gennemgå brugsbetingelserne. Tryk på **Accepter** for at fortsætte.
- 3 Sørg for, at høreapparaterne er opladet og tændt. Vælg **Fortsæt**.
- 4 Appen vil informere brugeren om, at tilladelse til enheder i nærheden er påkrævet. Tryk på **Ok**, og vælg **Tillad**.
- 5 Vælg derefter **Dan Par** og tryk på **Tillad**.
- 6 My Starkey vil oprette forbindelse til høreapparaterne. Vælg **Fortsæt**.
- 7 Log ind eller opret en konto med en e-mailadresse og adgangskode. **En konto er påkrævet**. Cloud Connectivity muliggør, at TeleHear, Faldalarm og app-/høreapparatoplysninger kan sikkerhedskopieres og gendannes.
- 8 Vælg **Fortsæt** for at give My Starkey adgang til brugerens lokation og sende notifikationer.
- 9 Brugeren skal give tilladelse til, at My Starkey må sende notifikationer. Vælg **Tillad** eller **Tillad ikke**.
- 10 Brugeren skal give tilladelse til, at My Starkey må indsamle og gemme høreapparatdata, aktivitetssporing og analyse. Vælg **Tillad** eller **Ikke nu**.

Du er nu klar til at bruge My Starkey. Vælg **Forstået** for at begynde.

Funktionerne kan variere fra land til land.

Appen kan se lidt anderledes ud afhængig af din telefon- og/eller høreapparatmodel.
Android og Play Butik er varemærker tilhørende Google, LLC.
Starkey-logoet, Pro Fit, Edge Mode og TeleHear er varemærker tilhørende Starkey Laboratories, Inc. ©2023 Starkey Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 2/23
FLYR4084-00-DA-ST.

