

QUICKTIP

My Starkey

Apple



Hent My Starkey

Du skal have et Apple ID for at hente My Starkey. Opret en konto her: <https://appleid.apple.com>.

- 1 Når din konto er oprettet, skal du åbne App Store.
- 2 Søg efter **My Starkey**.
- 3 Vælg **Hent**.



My Starkey

Parring

Parring fuldføres, efter at høreapparaterne er blevet programmeret i Pro Fit-softwaren. Sørg for, at Pro Fit er lukket før parring med enhver Apple-enhed.

- 1 Vælg **Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater**.
- 2 Sørg for, at Bluetooth® er tændt.
- 3 Sluk og tænd for høreapparaterne.
- 4 Vælg høreapparaterne under MFI-høreapparater.
- 5 Tryk "**Dan par**". For et sæt høreapparater, skal du trykke "**Dan par**" to gange.
- 6 Sørg for, at der står "**Tilsluttet**" efter høreapparatets navn.

Konfiguration af My Starkey

- 1 Åben My Starkey-appen og tryk på **Kom i gang** for at begynde.
- 2 Gennemgå brugsbetingelserne. Tryk på **Accepter** for at fortsætte.
- 3 Sørg for, at høreapparaterne er opladet og tændt. Vælg **Fortsæt**.
- 4 Appen vil spørge, om brugeren vil forbinde til Bluetooth. Vælg **Ok** og My Starkey vil forbinde til høreapparaterne. Vælg **Fortsæt**.
- 5 Log ind eller opret en konto med en e-mailadresse og adgangskode. **En konto er påkrævet**. Cloud Connectivity muliggør, at TeleHear, Faldalarm og app-/høreapparatoplysninger kan sikkerhedskopieres og gendannes.
- 6 Vælg **Fortsæt** for at give My Starkey adgang til brugerens lokation og sende notifikationer.
- 7 Brugeren skal give tilladelse til, at My Starkey må sende notifikationer. Vælg **Tillad** eller **Tillad ikke**.
- 8 Brugeren skal give tilladelse til, at My Starkey må indsamle og gemme høreapparatdata, aktivitetssporing og analyse. Vælg **Tillad** eller **Ikke nu**.
- 9 Brugeren skal give tilladelse til, at My Starkey må sende advarsler til brugeren. Vælg **Tillad** eller **Tillad ikke**. Valg af **Tillad** sikrer, at en faldalarm vil blive præsenteret for brugeren, selvom telefonen er på lydløs eller "forstyr ikke" er tændt..

Du er nu klar til at bruge My Starkey. Vælg **Forstået**.

Funktionerne kan variere fra land til land.

Appen kan se lidt anderledes ud afhængig af din telefon- og/eller høreapparatmodel.
Apple og App Store er varemærker tilhørende Apple, Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og bruges af Starkey i henhold til en licensaftale. | Starkey-logoet, Pro Fit, Edge Mode og TeleHear er varemærker tilhørende Starkey Laboratories, Inc. ©2023 Starkey Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 2/23 FLYR4085-00-DA-ST.

