

QUICKTIP

Opdatering af receiveren efter første tilpasning


Lejlighedsvis er der behov for at ændre receiveren, efter en bruger er blevet tilpasset med et RIC-apparat. Pro Fit er designet til at tage forbehold for disse ændringer.

Trin for trin

NOTE: Dette eksempel viser en tidligere tilpasset M-receiver, der skiftes til en P-receiver.


- 1 Montér de nye receivere, og åbn klienten i Pro Fit. De nye receivere vil automatisk blive registreret.

[Fig. 1]

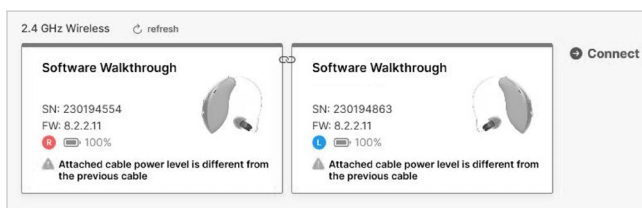

Figur 1


- 2 Forbind til høreapparaterne i Pro Fit.
- 3 Efterse og bekræft valg. Når adspurgt, vælg **Opdater Receiver**. [Fig. 2]

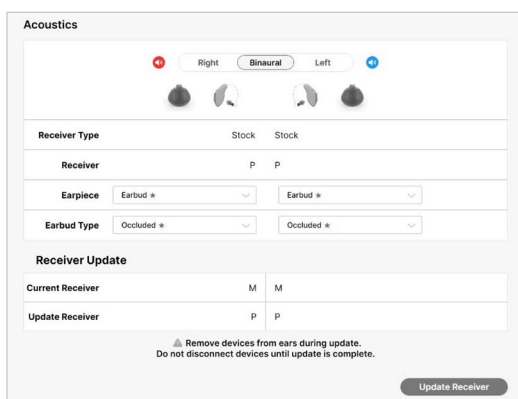

Figur 2

- 4 Hvis feedbackmåling var foretaget tidligere, vil denne måling skulle foretages på ny, inden opdateringen er komplet [Fig. 3]

NOTE: Hvis ikke har mulighed for at foretage målingen, vil apparaterne justere sig ind til at reducere feedback for brugeren over de næste 30 timers brug.

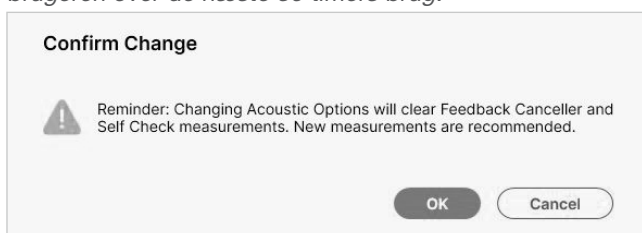

Figur 3

Trin for trin (Fortsat)

- 5 Efter færdiggørelse af opdateringen, kommer der en bekræftelsesbesked. [Fig. 4]
- 6 Denne proces vil automatisk opdatere indstillingerne til at tilnærme sig de tidligere. På billedet nedenfor ser du frekvenskurverne for henholdsvis M-receivere (før) og P-receiveren (efter). Bemærk at indstillingerne er nærmest identiske, men du ville også kunne finindstille senere ved behov.[Fig. 5]

Frekvensresponsen kan også ændres hvis det ønskes, men bemærk at den nye er så tæt på den gamle, at det ikke skulle give anledning til reduceret lyd kvalitet, eller feedback.

Acoustics

Right Binaural Left

Receiver Type Stock Stock

Receiver P P

Earpiece Earbud * Earbud *

Earbud Type Occluded * Occluded *


Receiver Update

Current Receiver	P	P
Update Receiver	P	P

The update has completed.

Close

Figur 4

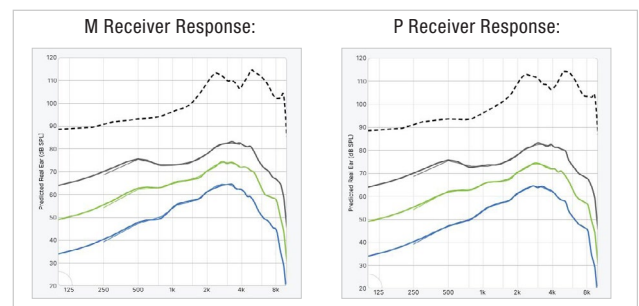

Figur 5