

QUICKTIP

Pro Fit Tilpasningsprotokol

Pro Fit guider tilpasseren igennem de tre sessionstyper: Forberedelse, Tilpasning, og Opfølgning.

Trådløs Opsætning

Note: For at tænde genopladelige 2.4 GHz RIC-høreapparater for første gang, sæt dem 3 sekunder i en oplader og tag dem derefter ud igen.


- 1 2.4 GHz-høreapparater kan kun programmeres trådløst med 2.4 GHz-programmeren eller NOAHlink Wireless 1.0 eller 2.0. Genopladelige høreapparater leveres med tilstrækkeligt batteri til at gennemføre programmering og tilpasning, men ikke tilstrækkeligt til en hel dags brug. Sæt høreapparaterne i opladeren før første tilpasning, for at sikre der er tilstrækkeligt batteri til brug.

Note: Hvis der er lavt batteri på høreapparater, vil der komme en advarsel i Pro Fit. Hvis dette er tilfældet, kan høreapparatet tilpasses, men ikke firmware-opdateres. En turbo charge med StarLink-opladeren er tilstrækkeligt for at kunne opdatere firmware.


- 2 Sæt SnapFit 2.0-receivere i høreapparaterne
- 3 Hvis du tilpasser RIC 312, sæt da batterier i høreapparaterne.
- 4 Hvis du tilpasser CROS/BiCROS, skal 2.4 Ghz CROS-receiveren og sender parres og programmeres samlet ved den første tilpasning. Modtageren kan programmeres med eller uden senderen til stede efter den første tilpasning. Hvis en sender bestilles separat, skal tilpasseren parre dem som et set i Pro Fit. Streaming fra senderen er en mulighed under tilpasningen.

Pro Fit Minute Fit™

- 1 Vælg høreapparat(erne), der skal programmeres. [Fig. 1]
- 2 Vælg **Forbind** for at påbegynde en ny tilpasning eller opfølgning med de nuværende indstillinger i høreapparaterne.
- 3 Gennemgå og bekræft dine valg. Vælg **Anvend Best Fit**. [Fig. 2]

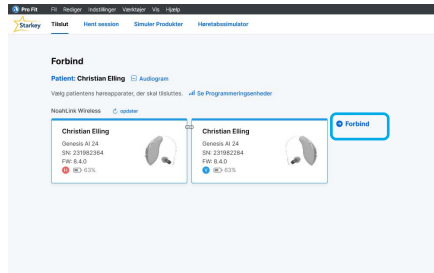

Figur 1

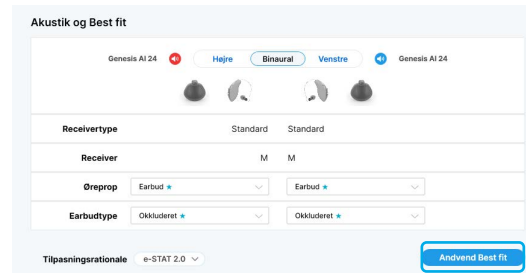

Figur 2

Forberedelse


Pro Fit avancerer nu til Forberedelse-sessionen, når der programmeres nye høreapparater. [Fig. 3]

- 1 Indstilling af nye høreapparater.
 - A. Vælg **Patienterfaringsniveau**
 - B. Vælg ønskede programmer under **Programmer** ved behov.
 - C. Vælg **Brugerkontroller**. Vælg hvilke funktioner du ønsker, og træk dem over på den ønskede handling til højre. [Fig. 4]

Note: Genopladelige høreapparater har ikke batteridøre.

For at give brugerne en mulighed for at sætte deres høreapparater i dvale, vil standardindstillingen for Tryk og Hold være "Sluk".

Note: Følsomheden for Tap-control kan justeres i drop down-menuen.

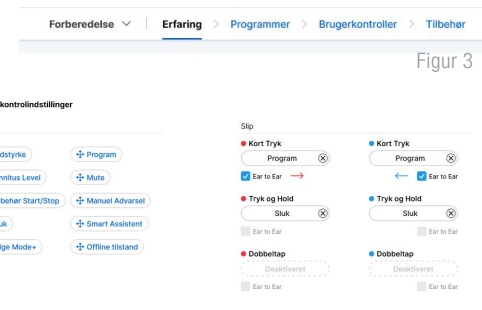


Figur 3

Figur 4


Forberedelse (fortsat)

D. Vælg **Tilbehør** for at parre og opsætte trådløst tilbehør ved behov. Se **Parringsinformation** for råd om tilkobling. Når parret, kan du justere **Høreapparatsmikrofon under streaming**, **Streaminglyd**, for tilbehøret, og **Favoritknop** for remote 2.0 samt justere **Høreapparatslyd under streaming af telefon** og **Streaminglyd** for brug over telefonen. [Fig. 5]

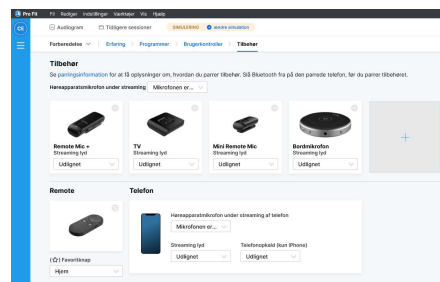

Figur 5

2 Brug Flyout-menuen og den venstre menu til at tilgå yderligere hjælp og muligheder. [Fig. 6]

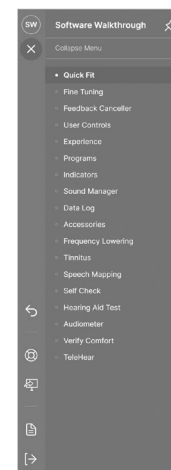

Figur 6

Tilpasning


Efter en forberedelsessession, vil Pro Fit automatisk fortsætte med en tilpasningssession [Fig. 7]

1 Giv brugeren høreapparaterne på, reducer støj i omgivelserne, og vælg så **Start Test** for at foretage feedbackmåling

2 Hvis adspurg om du vil opdatere vent model, vælg **Ja** for at matche den målte **respons til target**, eller **Nej** hvis du allerede har justeret lyden i forhold til de viste targets. [Fig. 8]



Figur 7

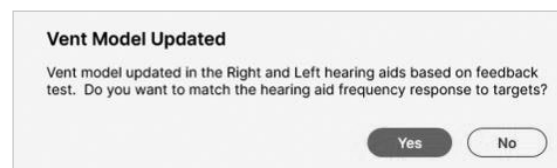

Figur 8

Note: *Vent-modellen bliver opdateret på målingerne fra feedback-testen. Denne opdatering ændrer ikke gain- eller output. Den opdaterede vent-model afspejler den målte akustik i øregangen med høreapparat på, og vil oftest påvirke lav- og mellemfrekvenser.*

3 Vælg **QuickFit** for at foretage generelle justeringer. Vælg **Finjustering** i bunden af QuickFit-skærmen eller i flyout-menuen for at foretage detaljerede justeringer af enkelte bånd og inputniveauer.


4 Vælg **Lydmanager** for at foretage justeringer i forhold til forskellige lyd miljøer og direktionalitet

5 Ved behov, vælg **Brugerkontroller**. Træk den ønskede funktion fra menuen til venstre over på det mulige handlinger på knapperne til højre. [Fig. 4]

6 Vælg **Indikatorer** aftjek kasserne for at slå ønskede indikatorer til eller fra [Fig. 9]

7 Juster **Alle Indikatorer** eller individuelle indikatorer for at øge eller reducere volumen for alle tone- eller taleindikatorer i trin på 5dB. Vælg høreapparatsikonet for at afspille dem gennem højttaleren.

8 Brug flyout-menuen og den venstre menu for at tilgå flere muligheder og hjælp. [Fig. 6]

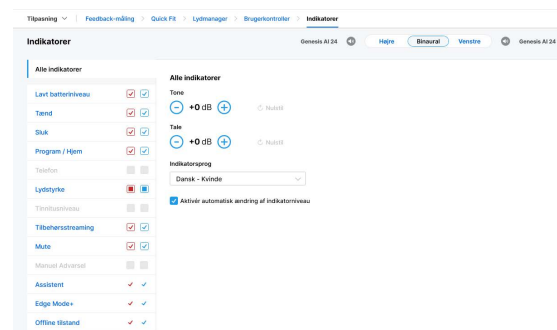

Figur 9

Opfølgning

Efter tilpasningssessionen, vil Pro Fit avancere til opfølgningssessionen automatisk. [Fig. 10]

- 1 Gennemgå **Data Log** ved behov
- 2 Brug **Finjustering** til at foretage detaljerede justeringer af enkelte bånd og inputniveauer.
- 3 Vælg **Lydmanager** for at foretage ændringer i bestemte lydmiljøer, og direktionalitet
- 4 Vælg **Indikatorer** for at justere lydstyrken og stimulustypen for indikatorer. [Fig. 9]
- 5 Ved behov, vælg Brugerkontroller. Træk den ønskede funktion fra menuen til venstre over på det mulige handlinger på knapperne til højre.[Fig. 4]
- 6 Brug flyout-menuen og den venstre menu for at tilgå flere muligheder og hjælp. [Fig. 6]

Opfølgning > | Data Log > Finjustering > Lydmanager > Brugerkontroller > Indikatorer

Figur 10