

QUICKTIP


Selvtjek

Selvtjek foretager en diagnostisk test af høreapparats system for at sikre optimal funktion af de forskellige komponenter, som mikrofoner, receiver, og kredsløb. Selvtjek kan foretages i Pro Fit, eller af brugeren selv i My Starkey-appen.

Start selvtjek i Pro Fit

Der vil automatisk blive etableret baseline for høreapparaterne, som angivet med grønne flueben. [Fig. 1]
Tilpasseren kan foretage selvtjek for brugeren direkte i Pro Fit.

- 1 Vælg **Selvtjek** fra **Flyout-Menuen**. ☰
- 2 Placér høreapparaterne på en plan flade. Receiverne skal pege mod loftet.
- 3 Sørg for, der ikke er støj i omgivelserne
- 4 Tryk **Start Test** for at begynde
- 5 En kort, kraftig stimulus afspilles nu i hvert apparat

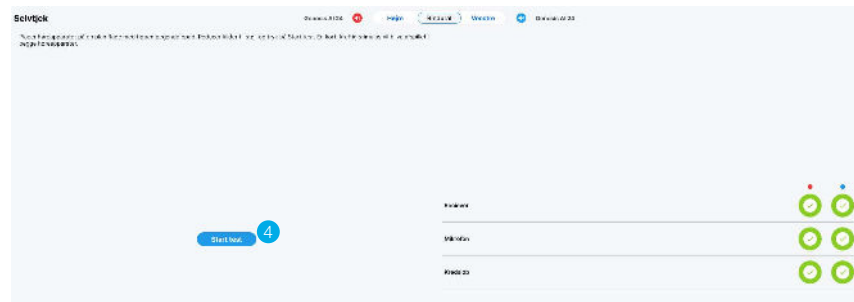


Figur 1

Resultater af Selvtjek

Når målingen er foretaget, kan du se resultaterne for de enkelte komponenter på skærmen. Hold musen over det enkelte resultat for yderligere information. [Fig. 2]

- (A) **Grøn:** Bestået
- (B) **Gul:** Yder ikke svarende til baseline. Tjek komponent.
- (C) **Rød:** Fejl

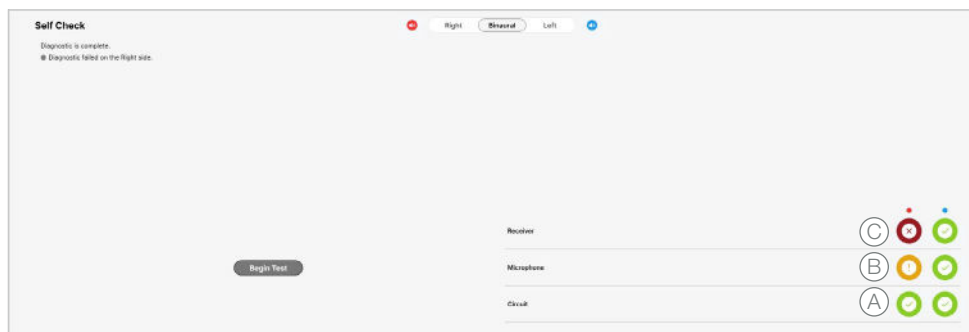








Figur 2

Selvtjek i My Starkey

Selvtjek giver brugeren en hurtig, bekvem måde at analysere deres høreapparats ydeevne, direkte fra My Starkey-appen.

Selvtjek i My Starkey:

- 1 Vælg **Min Hørelse**.
- 2 Vælg **Selvtjek**.
- 3 Placer høreapparater på en plan flade med receiverne vendt mod loftet.
- 4 Sørg for, der ikke er støj i omgivelserne.
- 5 Vælg **Kør Selvtjek**.
- 6 En kort tone afspilles i hvert apparat
- 7 Når målingen er foretaget, vil resultaterne vises for hver komponent på skærmen.
- 8 Vælg **Detaljer** under hver komponent. *Se eksempler på skærmbillederne nedenfor.*

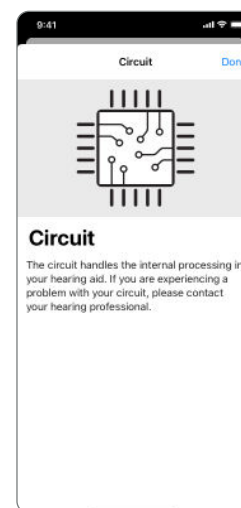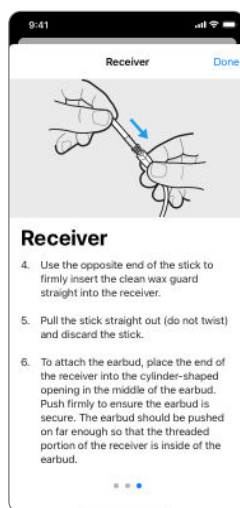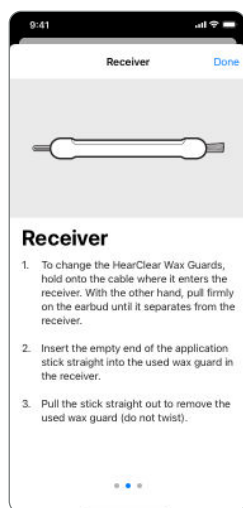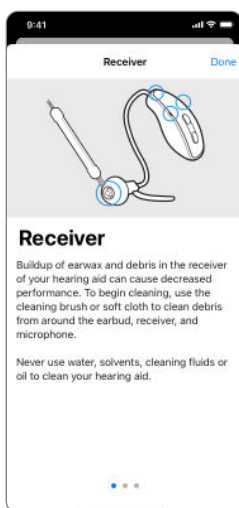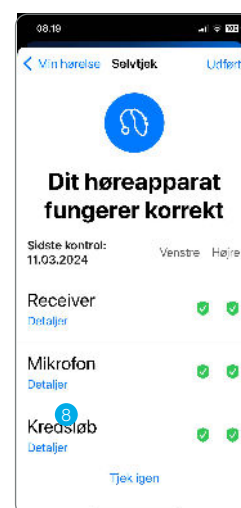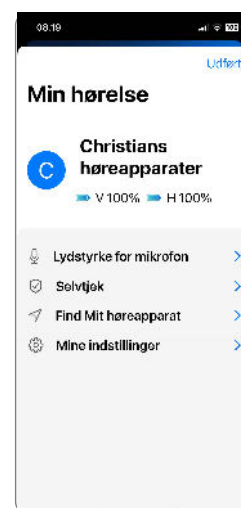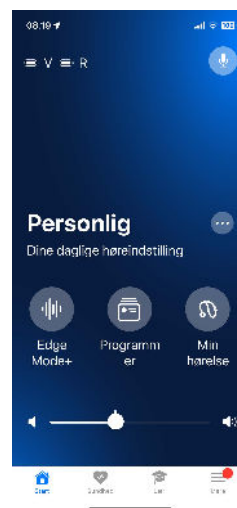

Der kan være små variationer i app baseret på telefon.

Pro Fit and the Starkey logo are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 2/23 FLYR4081-00-EN-SC

