

## QUICKTIP

# Rechargeable Hearing Aid StarLink Chargers 2.0



StarLink Charger 2.0 og StarLink Premium Charger 2.0 fungerer som oplader og etui til genopladelige høreapparater. RIC RT og mRIC R har hver sin opladertype.

StarLink Charger 2.0 har ikke et indbygget batteri, og skal derfor være tilsluttet en ekstern strømkilde (stikkontakt eller USB) for at oplade høreapparaterne.

StarLink Premium Charger 2.0 kommer med indbygget batteri, og kan derfor oplade høreapparater uden at være tilsluttet en ekstern strømkilde.

Begge opladere har turbo charging. Dette aktiveres automatisk, når høreapparaterne er ved at løbe tør for strøm. Høreapparaterne vil oplade hurtigt, og give ca. 3 timers brugstid på kun 10 minutters opladning.

**NOTE:** Hvert sæt høreapparater sendes med sin tilsvarende oplader, afhængig af model (RIC RT eller mRIC R). Den korrekte oplader skal anvendes, for at apparaterne bliver opladet korrekt. På undersiden af opladeren kan man se, hvilken model opladeren passer til. På premium chargeren vil der være et batterisymbol ved siden af modelnavnet. [billede 1]



Billede 1



StarLink Charger 2.0



StarLink Premium Charger 2.0

## LED-indikatorer for opladning standard charger

Indersiden af opladeren er udstyret med to LED-indikatorer, som giver information om opladningen.

- Når høreapparaterne placeres korrekt i opladeren, tænder indikatorerne for at vise påbegyndt opladning.
- Når høreapparaterne er under opladning, blinker LED-indikatorerne.
- Når høreapparaterne er fuldt opladet, lyser LED-indikatorerne uafbrudt.



## LED-indikatorer for opladning Premium Charger 2.0

Det indbyggede batteri muliggør opladning af høreapparaterne, selvom opladeren ikke er tilsluttet en strømkilde. Indersiden af opladeren er udstyret med 4 LED-indikatorer, der viser status på det indbyggede batteri. [billede 2 og 3]

- Når opladeren er tilsluttet en strømkilde (stikkontakt eller USB), vil LED-indikatorerne vise status på det indbyggede batteri.
- Når opladeren ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, og høreapparaterne sidder i, vil LED-indikatorerne vise status på det indbyggede batteri i 30 sekunder, og derefter slukke for at spare strøm.



billede 2

	Up to 25% charged
	Up to 50% charged
	Up to 75% charged
	Up to 100% charged
	Charging complete

billede 3

## Brug

- 1 Høreapparaterne vil være fuldt opladede på 3.5 timer. Starlink Premium Charger 2.0 vil være fuldt opladet på under 3.5 timer. På en fuld opladning, kan høreapparaterne oplades op til 3 gange (uden at være tilsluttet en strømkilde) ved hjælp af det indbyggede batteri.
- 2 Det er sikkert at opbevare høreapparaterne i laderen i længere perioder, da de ikke kan overoplade.
- 3 Høreapparaterne vil oplade, hvad enten låget er åbnet eller lukket.
- 4 Høreapparaterne vil automatisk tænde, når de fjernes fra opladeren, og slukke når det isættes. **OBS:** *Høreapparaterne vil tænde i opladeren, hvis ikke der er en strømkilde (stikkontakt/USB eller ikke mere indbygget batteri).*